



Produktkatalog Wundbehandlung

Verbandstoffe der WGKK

Impressum

Herausgabe & Druck:

Wiener Gebietskrankenkasse
Wienerbergstraße 15–19
1100 Wien

Redaktion & Gestaltung: Öffentlichkeitsarbeit

Für den Inhalt verantwortlich: Leistungsabteilung

Stand: 1. Jänner 2019

Version 2.0

Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Wiener Gebietskrankenkasse gestattet.

Satz- und Druckfehler vorbehalten. Bildquelle: shutterstock & WGKK

Inhalt

A. Allgemeine Informationen und Produktgruppen	6	2.3 Saugkompressen	16
Algorithmus chronische Wunde	8	2.3.1 Saugkompressen mit Vliesstoffauflage – steril	16
<hr/>		2.3.2 Saugkompressen mit Superabsorber - steril	17
B. Produktkatalog	9	2.3.3 Saugkompressen, antimikrobiell, physikalisch	17
<hr/>		2.3.4 Tamponade - antimikrobiell, physikalisch	17
1. Wundreinigung	10	<hr/>	
1.1 Wundreinigung Spüllösung NACI	10	3. Wundschnellverbände, Fixierungen und Schlauchverbände	18
1.2 Wundreinigung Spüllösung Ringerlösung	10	3.1 Wundschnellverband steril	18
1.3 Wundreinigung Spüllösung keimreduzierend	10	3.2 Folien, semipermeabel, steril	18
1.4 Wundreinigung physikalisch osmotisch – süß (Medizinischer Honig und Honigprodukte)	11	3.3 Folien, semipermeabel, nicht steril (in Rollen)	18
1.5 Wundreinigung mechanisch - Wischdebridement	11	3.4 elastische Fixierbinde nicht haftend	19
1.6 Wundrandschutz	11	3.5 elastische Fixierbinde mit Hafteffekt	19
1.7 Kunststofffilm	12	3.6 Schlauchverband ohne elastischen Faden vorgefertigt, einzeln verpackt	19
<hr/>		3.7 Schlauchverband elastisch	20
2. Wundauflagen	13	3.8 Netzschlauchverband	20
2.1 Kompressen	13	3.9 Heftpflaster Gewebe	20
2.1.1 Mullkompressen Baumwolle steril - 8fach	13	3.10 Heftpflaster Folie	20
2.1.2 Verbandmull unsteril	13	3.11 Heftpflaster Kunstseide (Latexfrei)	20
2.1.3 Vliesstoffkompressen steril - 6fach	13	3.12 Klebevlies starr	20
2.1.4 Vliesstoffkompressen unsteril - 6fach	13	3.13 Klebevlies elastisch	21
2.1.5 Schlitzkompressen Vliesstoff, steril	14	3.14 Schaumstoffbinden	21
2.2. Salbentüll, diverse Wundauflagen	14	3.15 Synthetische Polsterbinden	21
2.2.1 Salbentüll antimikrobiell	14	3.16 Beschichtete Bandagen Alginatbeschichtung (textilelastisch)	21
2.2.2 Wunddistanzgitter mit und ohne Beschichtung	14	3.17 Kompressionssysteme Einweg	21
2.2.3 Wundauflage - antimikrobiell, physikalisch	15	<hr/>	
2.2.4 Wundauflage - antimikrobiell, physikalisch- mit Hydrogel	15	4. Hydrofaser- Auflagen und wirkverwandte Faserkompressen	22
2.2.5 Kollagenwundauflagen - neutral	15	4.1 Hydrofaser-Auflagen	22
2.2.6 Kollagenwundauflagen – mit Silber	15	4.2 Hydrofaser-Auflagen mit Silber	22
2.2.7 Feuchtigkeitsspendende Wundauflagen (Polyacrylat vorgefeuchtet)	16	<hr/>	
2.2.8 Wundeinlage mit Silber-antimikrobiell	16	5. Wundauflagen mit Aktivkohle	23
		5.1 Aktivkohleaufflage	23
		5.2 Aktivkohle Saugkompressen	23
		5.3 Aktivkohleaufflagen	

antimikrobiell Silber	23		
<hr/>			
6. Alginate (Wundfüller)	24		
6.1 Alginat - Auflagen, neutral	24		
6.2 Alginat - Tamponade, neutral	24		
6.3 Alginat - Auflagen mit Silber, antimikrobiell	24		
6.4 Alginat – Tamponade mit Silber, antimikrobiell	25		
<hr/>			
7. Hydrokolloide	26		
7.1 Hydrokolloide dünn und extradünn	26		
7.2 Hydrokolloide standard	26		
7.3 Hydrokolloide mit Kleberand	26		
7.4 Hydrokolloide transparent	26		
7.5 Hydrokolloide sacral	26		
<hr/>			
8. Schaumstoffe	27		
8.1 Schaumstoffe adhäsiv	27		
8.1.1 Schaumstoffe adhäsiv, mit Haftrand, mäßig saugend	27		
8.1.2 Schaumstoffe, adhäsiv, stark saugend	27		
8.1.3 Schaumverband adhäsiv, mit Haftrand, <u>mit Silber</u>	27		
8.2 Schaumstoffe mit Beschichtung	28		
8.2.1 Schaumstoffe mit Beschichtung - ohne Kleberand - gering saugend	28		
8.2.2 Schaumstoffe mit Beschichtung - ohne Kleberand – mäßig bis stark saugend	28		
8.2.3 Schaumverband adhäsiv (haftend durch Beschichtung), mit Silber	29		
8.2.4 Schaumstoffe mit Beschichtung - mit Kleberand - gering saugend	29		
8.2.5 Schaumstoffe mit Beschichtung - mit Kleberand - mäßig bis stark saugend	29		
8.3 Schaumstoffe nicht-adhäsiv	30		
8.3.1 Schaumstoffe gering saugend	30		
8.3.2 Schaumstoffe mäßig saugend	30		
8.3.3 Schaumstoffe stark saugend	31		
		8.3.4 Schaumstoffe, nicht adhäsiv-mit Silber	31
		8.4 Schaumstoffe reinigend & feuchtend	31
		8.4.1 Schaumstoffe reinigend & feuchtend – nicht adhäsiv – mäßig saugend	31
		8.4.2 Schaumstoffe reinigend & feuchtend – nicht adhäsiv – stark saugend	32
		8.4.3 Schaumstoffe reinigend & feuchtend – nicht adhäsiv, mit Silber	32
		8.4.4 Schaumstoffe reinigend & feuchtend – cavity - stark saugend	32
		8.4.5 Schaumstoffe reinigend & feuchtend – cavity - stark saugend, mit Silber	32
		8.4.6 Schaumstoffe - offenporig	32
		8.5 Schaumstoffe für spezielle Lokalisationen	33
		8.5.1 Schaumstoffe Sacral - mäßig saugend	33
		8.5.2 Schaumstoffe Sacral – mit Beschichtung - mit Kleberand - mäßig bis stark sau	33
		8.5.3 Schaumstoffe Sacral – haftend durch Beschichtung - mäßig saugend	33
		8.5.4 Schaumstoffe Sacral mit Silber – antimikrobiell	33
		8.5.5 Schaumstoffe -haftend durch Beschichtung -Ferse - mäßig saugend	34
		8.5.6 Schaumstoffe -Cavity- mäßig saugend	34
		8.5.7 Schaumstoffe – haftend durch Beschichtung, Cavity- mäßig saugend	34
		8.5.8 Schaumstoffe -Tracheo-	34
<hr/>			
		9. Superabsorber (Polyacrylatabsorber)	35
		9.1 Saugstarke Wundaufgabe, Superabsorber mit Zellulose verpresst, Absorption mehr als 150g genormte Prüflösung/100cm²	

Saugkern	35
9.2 Saugstarke Wundauflage, Superabsorber mit geringem Zelluloseanteil, Absorption mehr als 150g genormte Prüflösung/100cm ² Saugkern	35
9.3 Saugstarke Wundauflage, Superabsorber mit Zellulose verpresst, mit nicht verklebender Wundkontaktschicht, Absorption mehr als 150g genormte Prüflösung/100cm ² Saugkern	36
<hr/>	
10. Hydrogele	37
10.1 Hydrogel – Verbände	37
10.2 Amorphe Hydrogele – neutral	37
10.3 Amorphe Hydrogele – antimikrobiell	37
<hr/>	
11. Sonstige Wundprodukte	38
11.1 absorbierendes Alginogel	38
11.2 flüssige Hyaluronsäure	38
<hr/>	
Hersteller	38
<hr/>	
Anhang 1: Spezialprodukte Epidermolysis bullosa	39

A. Allgemeine Informationen und Produktgruppen:

Für die Therapie chronischer Wunden gibt es eine Vielfalt verschiedener hydroaktiver Verbandsmaterialien. Grob vereinfachend können sie in einige wenige Kategorien eingeteilt werden:

- **Hydrokolloidverbände:** Hydrokolloide wirken hydroaktiv und okklusiv. Sie nehmen nur wenig Wundexsudat auf, bilden in Verbindung mit dem Wundsekret ein Gel, das sich auf die Wunde legt und diese feucht hält. Der selbsthaftende Verband darf nicht bei infizierten Wunden verwendet werden.
- **Hydrofaser:** weiche, drapierfähige Tamponade oder Wundauflage, nimmt Wundsekret auf und bildet ein weiches Gel. Das Exsudat wird nicht horizontal weitergeleitet. Effektiver Wundrandschutz, die Wundaufgabe sollte mind. 3-4 cm über den Wundrand hinaus reichen.
- **Hydrogele:** Feuchten aufgrund des hohen Wassergehalts den Wundgrund an, zur Versorgung freiliegender Sehnen und Knochen. Sie unterstützen die Auflösung von Nekrosen und Belägen. Benötigen einen Sekundärverband. Nicht für stark nässende Wunden geeignet.
- **Aktivkohleverbände:** Haben eine aufsaugende Wirkung und sorgen dafür, dass Wundgerüche erträglich bleiben und Verbände durch Verbleib auf der Wunde wirtschaftlich genutzt werden können.
- **Alginate:** Binden überschüssiges Wundexsudat, Zelltrümmer und Keime. Es bildet sich ein Gel, das die Wunde feucht und warm hält. Die Wundränder können mazerieren, daher ist ein genaues Zuschneiden auf die Wundgröße notwendig. Wirken autolytisch und aufgrund des Calciumanteils leicht blutstillend. Die Wunde wird mit einem Sekundärverband verschlossen.
- **Schaumstoffverbände:** Sie bestehen größtenteils aus Polyurethan und einer halbdurchlässigen Folie. Sie können das 20 – 30-fache ihres Eigengewichts an Wundexsudat aufnehmen und sollten daher bei stärker nässenden Wunden verwendet werden. Es besteht Mazerationsgefahr des Wundrands und der Wundumgebung.

- **Superabsorber:** Eignen sich für Wunden, die sehr viel Exsudat bilden und bei denen die Granulation gefördert werden soll. Bei tumorösen exulcerierenden Wunden kann der palliative Einsatz von Superabsorbentern indiziert sein, da kaum ein anderes Verbandsmaterial eine so starke Saugkraft hat.
- **Silberverbände:** Geben elementares, nanokristallines oder ionisches Silber an die Wunde ab. Silberprodukte wirken antibakteriell und fungizid, dürfen nur kurzzeitig bei kritisch kolonisierten Wunden – maximal 2 Wochen – eingesetzt werden. Bei wenig sezernierenden Wunden müssen Silberprodukte angefeuchtet werden.
- **Kompressionsverbände:** Voraussetzung für Wundheilung bei venösen Ulcera. Bestehen aus mehreren Schichten: Hautpflege (KV trocknet aus!), Hautschutz (Schlauchverband), Polsterung (Ausgleich von Unebenheiten, gleichmäßige Druckverteilung) und der Kompression. Kontraindiziert bei PAVK, dekompensierter Herzinsuffizienz, Phlegmasia coerulea dolens!

Die Abgabe von Verbandstoffen erfolgt im Allgemeinen durch Bandagisten mittels eines Verordnungs Scheins. Für fast alle Produktgruppen gibt es bewilligungsfreie Produkte, die entweder aus medizinischen (gute Verträglichkeit, Handhabung und Qualität) und/oder aus ökonomischen Gründen von Expertinnen und Experten der Arbeitsgruppe Verbandstoffe empfohlen werden.*

Die Produkte sind hervorragend für eine moderne Wundversorgung geeignet.

Sondergrößen bei Verbandstoffen sind nur selten notwendig und zumeist teurer als Standardgrößen, daher sollte die Indikation/Wirtschaftlichkeit stets sorgfältig überprüft werden.

**Die Verbandstoffliste wurde von der Arbeitsgruppe „Verbandstoffe“, bestehend aus ärztlichen und pflegerischen Wundexpertinnen und -experten der mobilen Hauskrankenpflege (FSW), der Ärztekammer Wien (Kurie der niedergelassenen ÄrztInnen), des Krankenanstaltenverbunds (KAV/ AKH Wien) und der Wiener Gebietskrankenkasse gemeinsam erarbeitet. Die Liste wird zukünftig mindestens einmal jährlich (1. Quartal) aktualisiert.*

Unsere ExpertInnen für chronische Wunden:

Dr. Peter Grundtner, Gesundheitszentrum Süd

Tel.: +43 1 601 22-4242

Mail: peter.grundtner@wgkk.at

DGKP AZWM Manuela Jovic, Gesundheitszentrum Nord:

Tel.: +43 1 601 22-40244

Mail: manuela.jovic@wgkk.at.

Literatur:

AWMF S3-Leitlinie:

Lokalthherapie chronischer Wunden bei Patienten mit den Risiken periphere arterielle Verschlusskrankheit, Diabetes mellitus, chronisch venöse Insuffizienz.


http://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/091-001k_S3_Lokalthherapie_chronischer_Wunden_2015-verlaengert.pdf; 2.3.2017

Wundmanagement:

Leitfaden zur Wundversorgung; WGKK und Hanusch-Krankenhaus, 1. Auflage 2016.

Eine pdf-Version des Verbandstoffkataloges finden Sie auf der Homepage der WGKK unter: www.wgkk.at/verbandstoffkatalog

Algorithmus Wundauflagen (nach AWMF Leitlinie)

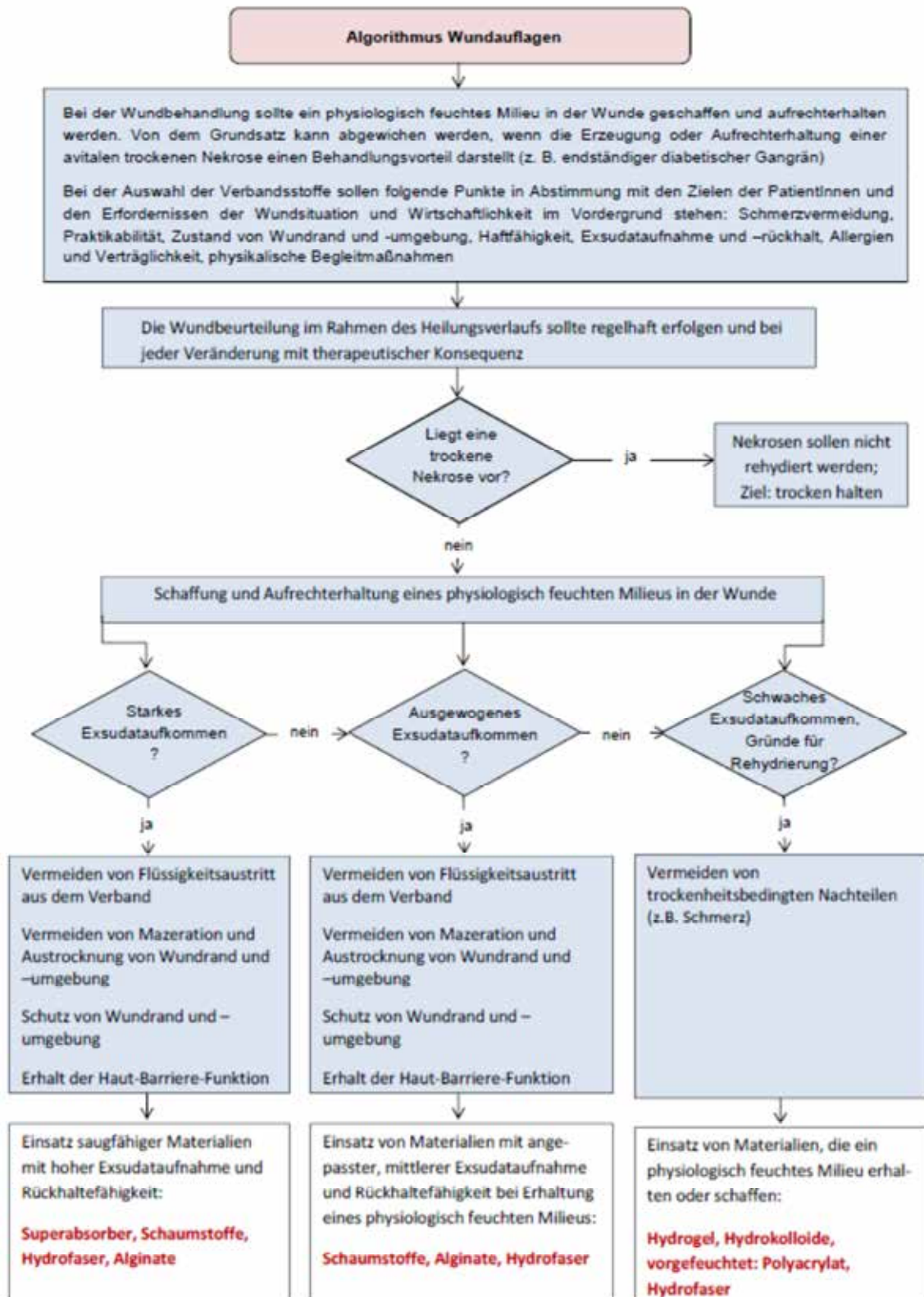

B. Produktkatalog

In der Folge finden Sie die auf Kosten der Wiener Gebietskrankenkasse verschreibbaren Verbandstoffe und Wundversorgungsprodukte. Fast alle angegebenen Produkte sind frei auf Verordnungsschein beim Bandagisten beziehbar.

Für Verbandstoffe fällt eine Rezeptgebühr pro Packung an, ausgenommen natürlich für Patientinnen und Patienten mit einer RG-Befreiung. Die Rezeptgebühren werden auf das Konto für die Berechnung der Rezeptgebührenobergrenze auch beim Bandagisten eingespeist.

Wir ersuchen Sie, die Richtlinien der ökonomischen Verschreibweise zu beachten und das Maß des medizinisch Notwendigen auch in der oft sehr komplizierten Kunst der Behandlung chronischer Wunden nicht zu überschreiten.

Legende:

Keine Bewilligung notwendig

Bewilligungspflichtige Produkte,
Angabe von Indikation und Diagnose

Das je Produkt angeführte Kürzel am Ende der Zeile bezeichnet den jeweiligen Hersteller. Diese sind zusammenfassend am Ende des Kataloges ersichtlich.

Unterschiedliche Schreibweisen verschiedener Produkte sind technisch bedingt und stellen keine Bevorzugung oder Bewertung der Produkte dar.

Der Verbandstoffkatalog wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieses Verbandstoffkataloges kann jedoch keinerlei Haftung übernommen werden.

1. Wundreinigung

Zur periodischen Wundreinigung sollten bevorzugt neutrale, wirkstofffreie Lösungen eingesetzt werden. Bei Verdacht auf erregerbedingte Entzündung der Wunde kann zur Wundreinigung die Anwendung von wirkstoffhaltigen Wundspüllösungen (in Form zugelassener Antiseptikallösungen) erwogen werden, wobei keine hochwertige Evidenz für deren Anwendung vorliegt. Unkonservierte Spüllösungen für Wunden sind nach Europäischem Arzneibuch zum sofortigen Verbrauch bestimmt, Reste sind zu verwerfen.

1.1 Wundreinigung Spüllösung NaCl

Empfohlen: Steripod Wundspülung 20 ml	25 Stk.	<input type="checkbox"/>	MOE02
NaCl 0,9% Ecolav Lsg. 30 ml	100 Stk.	<input type="checkbox"/>	BRA05
NaCl 0,9% Ecolav Lsg. 100 ml	20 Stk.	<input type="checkbox"/>	BRA05

1.2 Wundreinigung Spüllösung Ringerlösung

Empfohlen: Ringerlact. Ecolav Lsg. 30ml	100 Stk.	<input type="checkbox"/>	BRA05
Ringerlact. Ecolav Lsg. 100 ml	20 Stk.	<input type="checkbox"/>	BRA05

1.3 Wundreinigung Spüllösung keimreduzierend

Indikation: Wundreinigung und Wundspülung von kontaminierten Weichteilwunden. Lösen von Biofilmen auf der Wunde (Auflegen von getränkten Kompressen für ca. 10-15 Minuten oder länger).

Empfohlen: Actimaris Sensitiv-Wundspül-Lsg. 300 ml	1 Stk.	<input type="checkbox"/>	CHE06
Actimaris Forte-Wundspül-Lsg. 300 ml	1 Stk.	<input type="checkbox"/>	CHE06
*Octenilin Wundspül-Lsg. 350 ml	1 Stk.	<input type="checkbox"/>	SCH27
*Lavasorb Wundspül-Lsg. 250 ml	1 Stk.	<input type="checkbox"/>	FRE02
*Prontosan W Lsg. 350 ml	1 Stk.	<input type="checkbox"/>	BRA05

Achtung: Vor Kombination mit wirkstoffhaltigen Externa (z.B. silber-, biguanid-, taurolidin- oder jodhaltigen Lösungen oder Wundauflagen) gut abtrocknen lassen! Die mit * gekennzeichneten Produkte (enthalten Octenidin oder Polyhexanid) sind toxisch für Knorpelgewebe!

1.4 Wundreinigung physikalisch osmotisch – süß (Medizinischer Honig und Honigprodukte)

Indikation: bei stagnierenden Wunden, MRSA-Wirkung, second-line Empfehlung (erst nach erfolgloser Standardtherapie).

Wirkungsweise: Der hohe Zuckergehalt des Honigs (84%) zieht mittels Osmose Flüssigkeit aus dem umgebenden Gewebe, verringert den pH Wert und setzt Wasserstoffsuperoxid frei.

Dadurch kommt es zur Reduktion von Wundödemen und vermehrter Exsudatbildung, die eine autolytische Wundreinigung unterstützt.

Empfohlen:	Medihoney Antib. Med.Honey 20 g	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	SOR01
	Vivamel 20 g med. Honig steril	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	CHE06
	Vivamel Alginat steril 5 x 5 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	CHE06
	Vivamel Alginat steril 10 x10 cm	10 Stk.	<input checked="" type="checkbox"/>	CHE06
	Vivamel Contact steril 5 x 5 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	CHE06
	Vivamel Contact steril 10 x 10 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	CHE06
	Medihoney Apinate Alginatverband 5 x 5 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	SOR01
	Medihoney Apinate Alginatverband 10 x 10 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	SOR01
	Revamil Gel 18 g	4 Stk.	<input type="checkbox"/>	FOC02
	Medihoney Tüllverband 10 x 10 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	SOR01
	Medihoney Apinate Alginat-VBD Tamponade 2 x 30 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	SOR01

1.5 Wundreinigung mechanisch - Wischdebridement

Indikation: Ulcus cruris venös und arteriell größer als 5 cm Durchmesser, Dekubitus ab Grad 2. Mittel der 2. Wahl, wenn nekrotische Belege durch herkömmliche Mull-, Vlieskompressen oder Gazetupfer nicht gelöst werden können (Große Volumina von leicht löslichen Debris sollten mit gewöhnlichen Mullkompressen entfernt werden). Pro Verbandwechsel nur 1 Stück, 2 Packungen zu 5 Stück reichen üblicherweise aus, Einsatz bis zur Granulationsphase. Die Verwendung wird empfohlen, falls kein chirurgisches Debridement möglich ist.

Empfohlen:	Debrisoft pad 10 x 10 cm	5 Stk.	<input checked="" type="checkbox"/>	RAU02
	UCS Ulcer Cleaning System	10 Stk.	<input checked="" type="checkbox"/>	WER04

1.6 Wundrandschutz

Indikation: Ein Wundrandschutz sollte bei stark sezernierenden Wunden durchgeführt werden, bei denen der Verband alleine das Wundsekret nicht ausreichend aufsaugen kann oder es zu einer Mazeration der Wundränder durch Körperflüssigkeiten kommen kann.

Empfohlen:	dline ZincCream 50 g	1 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02
	*Inotyol Salbe 25g	1 Stk.	<input type="checkbox"/>	

***Achtung:** Dieses Produkte ist nur über Apotheken erhältlich!

1.7 Kunststofffilm

Indikation: Stomaversorgung, Drainagen

Das Produkt sollte ausschließlich zum Schutz der Wundränder vor aggressiven Sekreten im Rahmen der Stomaversorgung eingesetzt werden. Bei chronischen Wunden mit starker Sekretion wird die Verwendung anderer Wundschutz-Produkte (s. unter 1.6) empfohlen, da diese keine schwer entferbaren Ablagerungen am Wundrand bilden.

Wirkungsweise: Bildet einen Schutzfilm (Silikon) zwischen Haut und Flüssigkeiten, schützt die Haut bis zu 72 Stunden vor Reibung, Klebstoffen und aggressiven Körperflüssigkeiten (Urin, Stuhl, Darmsekret).

Achtung: Nicht mit anderen Hautschutzprodukten kombinieren! *)

Empfohlen: Cavilon Lolly 1 ml 3343P

5 Stk.



DMO01

*) Die Rückstände müssen beim Verbandwechsel sorgfältig entfernt werden, da sich bei wiederholter Anwendung schwer entfernbare Ablagerungen am Wundrand bilden und die Wundheilung behindern.

2. Wundauflagen

2.1. Kompressen

2.1.1 Mullkompressen Baumwolle steril - 8fach

Empfohlen: Mullk. Gazin ST 8F 5 x 5 cm, 50 x 2	100 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02
Mullk. Gazin ST 8F 7,5 x 7,5 cm	100 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02
Mullk. Gazin ST 8F 10 x 10 cm	100 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02
Mullk. Gazin ST 8F 10 x 20 cm	100 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02
Mullk. ES steril, 8F 5 x 5 cm (25 x 2)	50 Stk.	<input type="checkbox"/>	HAR01
Mullk. ES steril, 8F 7,5 x 7,5 cm (25 x 2)	50 Stk.	<input type="checkbox"/>	HAR01
Mullk. ES steril, 8F 10 x 10 cm (25 x 2)	50 Stk.	<input type="checkbox"/>	HAR01
Mullk. ES steril, 8F 10 x 20 cm (25 x 2)	50 Stk.	<input type="checkbox"/>	HAR01

2.1.2 Verbandmull unsteril

Mullk. Noba UST 8F 5 x 5 cm	100 Stk.	<input type="checkbox"/>	KAE01
Mullk. Noba UST 8F 7,5 x 7,5 cm	100 Stk.	<input type="checkbox"/>	KAE01

2.1.3 Vliesstoffkompressen steril - 6fach

Empfohlen: Medicomp Ext. 6F ST 5 x 5 cm	50 Stk.	<input type="checkbox"/>	HAR01
Medicomp Ext. 6F ST 7,5 x 7,5 cm	50 Stk.	<input type="checkbox"/>	HAR01
Medicomp Ext. 6F ST 10 x 10 cm	50 Stk.	<input type="checkbox"/>	HAR01
Medicomp Ext. 6F ST 10 x 20 cm	50 Stk.	<input type="checkbox"/>	HAR01
Topper 12 Kompr. ST 5 x 5 cm	90 Stk.	<input type="checkbox"/>	CHE06
Topper 12 Kompr. ST 10 x 10 cm	140 Stk.	<input type="checkbox"/>	CHE06
Topper 12 Kompr. ST 7,5 x 7,5 cm	80 Stk.	<input type="checkbox"/>	CHE06
Topper 12 Kompr. ST 10 x 20 cm	70 Stk.	<input type="checkbox"/>	CHE06
Vliwasoft Vlieskompr. 6F ST 5 x 5 cm	100 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02
Vliwasoft Vlieskompr. 6F ST 7,5 x 7,5 cm	100 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02
Vliwasoft Vlieskompr. 6F ST 10 x 10 cm	100 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02
Vliwasoft Vlieskompr. 6F ST 10 x 20 cm	100 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02

2.1.4 Vliesstoffkompressen unsteril - 6fach

Empfohlen: Vliwasoft Vlieskompr. 6F UST 5x 5cm	100 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02
*Vliwasoft Vlieskompr. 6F UST 7,5 x 7,5 cm	100 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02
*Vliwasoft Vlieskompr. 6F UST 10 x 10 cm	100 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02
*Vliwasoft Vlieskompr. 6F UST 10 x 20 cm	100 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02

*Für Intertrigo

Medicomp Ext. 6F UST 5 x 5 cm	100 Stk.	<input type="checkbox"/>	HAR01
-------------------------------	----------	--------------------------	-------

Medicomp Ext. 6F UST 7,5 x 7,5 cm	100 Stk.	<input type="checkbox"/>	HAR01
Medicomp Ext. 6F UST 10 x 10 cm	100 Stk.	<input type="checkbox"/>	HAR01
Medicomp Ext. 6F UST 10 x 20 cm	100 Stk.	<input type="checkbox"/>	HAR01
Topper 12 Kompr. UST 5 x 5 cm	200 Stk.	<input type="checkbox"/>	CHE06
Topper 12 Kompr. UST 7,5 x 7,5 cm	200 Stk.	<input type="checkbox"/>	CHE06
Topper 12 Kompr. UST 10 x 10 cm	200 Stk.	<input type="checkbox"/>	CHE06
Topper 12 Kompr. UST 10 x 20 cm	200 Stk.	<input type="checkbox"/>	CHE06

2.1.5 Schlitzkompressen Vliesstoff, steril

Empfohlen: Schlitzkompr. TOPPER 7,5 x 7,5 cm	100 Stk.	<input type="checkbox"/>	CHE06
Schlitzkompr. TOPPER 10 x 10 cm	100 Stk.	<input type="checkbox"/>	CHE06
Schlitzkompr. Vliwasoft 7,5 x 7,5 cm	100 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02
Schlitzkompr. Vliwasoft 10 x 10 cm	100 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02

2.2. Salbentüll, diverse Wundauflagen

Grobmaschige Gewirke aus Cellulose oder Kunstfaser mit einer hydrophoben Fettsalbe. Die Maschenweite erlaubt ein ungehindertes Abfließen des Exsudats. Die Salbenimprägnierung verhindert das Verkleben der Wundoberfläche mit dem Sekundärverband.

2.2.1 Salbentüll antimikrobiell

gebrauchsfertiger nicht haftender Gittertüll antiseptisch imprägniert (PVP-Jod); nicht anwendbar bei Iodallergie und bei Patienten mit Schilddrüsenerkrankung sowie bei geplanter Radiojodbehandlung.

Achtung: Nicht mit alkoholhaltigen Desinfektionsmitteln kombinieren, führt zu dauerhaften Hautverfärbungen!

Empfohlen: Inadine 5 x 5 cm	25 Stk.	<input type="checkbox"/>	CHE06
Inadine 9,5 x 9,5 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	CHE06

2.2.2 Wunddistanzgitter mit und ohne Beschichtung

Empfohlen: Atrauman silicone 10 x 7,5 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	HAR01
Atrauman silicone 20 x 10 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	HAR01
Atrauman silicone 30 x 20 cm	5 Stk.	<input checked="" type="checkbox"/>	HAR01
Adaptic touch non-adhering silicone dressing 7,6 x 5 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	CHE06
Adaptic touch non-adhering silicone dressing 7,6 x 11 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	CHE06
Adaptic touch non-adhering silicone dressing 12,7 x 15 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	CHE06
Cutimed Sorbion Plus 7,5 x 7,5 cm	25 Stk.	<input type="checkbox"/>	SOR01
Cutimed Sorbion Plus 10 x 10 cm	25 Stk.	<input type="checkbox"/>	SOR01
Cutimed Sorbion Plus 20 x 10 cm	25 Stk.	<input type="checkbox"/>	SOR01
Cutimed Sorbion Plus 20 x 20 cm	25 Stk.	<input type="checkbox"/>	SOR01

Mepitel Netzaufkl. 5 x 7,5 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	MOE02
Mepitel Netzaufkl. 7,5 x 10 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	MOE02
Mepitel Netzaufkl. 10 x 18 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	MOE02

2.2.3 Wundauflage - antimikrobiell, physikalisch

Indikation: Kontaminierte, infizierte Wunden

Wirkungsweise: Antimikrobieller Effekt durch physikalische (hydrophobe) Wechselwirkung

Empfohlen: Cutimed Sorbact Kompr. 4 x 6 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	BSN01
Cutimed Sorbact Kompr. 7 x 9 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	BSN01

2.2.4 Wundauflage - antimikrobiell, physikalisch- mit Hydrogel

Indikation: Kontaminierte, infizierte Wunden

Wirkungsweise: Wirkstofffrei, keimzahlreduzierender Effekt

Empfohlen: Cutimed Sorbact Gel Kompr. 7,5 x 7,5 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	BSN01
---	---------	--------------------------	-------

2.2.5 Kollagenwundauflagen - neutral

Indikation: Chronische stagnierende Wunden, bei chronischen sekundär heilenden Wunden in der Exsudations- und / oder Granulationsphase.

Nicht anwenden bei Infektion, trockenem nekrotischen Gewebe, dicken Fibrinbelägen und stark sezernierenden Wunden.

Wirkungsweise: Durch Gefriertrocknung von wässrigen Kollagendispersionen entstehen poröse schwammartige Wundauflagen. Bei Kontakt mit Exsudat verliert das Kollagen seine poröse Struktur und wandelt sich in ein visköses Gel um. Kollagen besitzt eine ausgeprägte Kapillaraktivität, die Exsudat und Zelltrümmer ansaugt. Die lokale Applikation von nativem Kollagen stimuliert die Synthese und Organisation von körpereigenem Kollagen im Wundgebiet. Vollständige Resorption; Granulation und Epithelialisierung sollen beschleunigt werden.

Empfohlen: Cutimed Epiona 5 x 5 cm	10 Stk.	<input checked="" type="checkbox"/>	BSN01
Cutimed Epiona 10 x 10 cm	10 Stk.	<input checked="" type="checkbox"/>	BSN01
Suprasorb ST/C Koll 4 x 6 x 0,8	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02
Promogran 28 ccm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	CHE06

2.2.6 Kollagenwundauflagen – mit Silber

Indikation: Strenge Indikationsstellung! Chronische stagnierende Wunden, bei chronischen, sekundär heilenden Wunden in der Exsudations- und / oder Granulationsphase.

Nicht anwenden bei Infektion, trockenem nekrotischen Gewebe, dicken Fibrinbelägen und stark sezernierenden Wunden.

Wirkungsweise: Enthält eine geringe Menge Silber (1% Silber-ORC). Abgedeckt werden Kollagen-Auflagen entsprechend der Exsudation mit hydroaktiven Wundauflagen, wie z.B. Folien, Hydrokolloiden oder Schaumverbänden zur Erhaltung des ideal feuchten Milieus.

Empfohlen:	PROMOGRAN PRISMA 28 ccm	10 Stk.	■	CHE06
	PROMOGRAN PRISMA 123 ccm	10 Stk.	■	CHE06

2.2.7 Feuchtigkeitsspendende Wundauflagen (Polyacrylat vorgefeuchtet)

Indikation: Trockene und gering exsudierende Wunden auch mit Schorf oder Belägen.

Wirkungsweise: Geben Feuchtigkeit ab und können im Austausch Wundexsudat aufnehmen. Schaffen so ein ideal feuchtes Mikroklima bei trockenen oder gering feuchten Wunden. Unterstützen auch das autolytische Debridement indem Schorfe und Beläge aufgeweicht werden. Reinigung und Dekontamination.

Empfohlen:	Hydroclean plus rund 5,5 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	HAR01
	Hydroclean plus 7,5 x 7,5 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	HAR01
	Hydroclean plus 10 x 10 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	HAR01
	Hydroclean plus cavity rund 4 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	HAR01

2.2.8 Wundeinlage mit Silber- antimikrobiell

Indikation: Infizierte chronische Wunden, Anwendungsdauer maximal 2 Wochen

Wirkungsweise: Nach Aktivierung mit Aqua bidest. wird Silber in die Wunde abgegeben, alternativ kann lt. Hersteller ein amorphes Hydrogel verwendet werden.

Achtung: Da silberhaltige Wundauflagen bei kritisch kolonisierten Wunden verwendet werden, sollte die Wunde spätestens alle 72 Std. neu beurteilt werden.

Empfohlen:	Acticoat flex 3 10 x 10 cm	5 Stk.	■	SMI01
	Silverlon 10 x 12 cm	10 Stk.	■	CHE06

2.3. Saugkompressen

2.3.1 Saugkompressen mit Vliesstoffauflage – steril

Empfohlen:	Zetuvit ST 10 x 10 cm	25 Stk.	<input type="checkbox"/>	HAR01
	Zetuvit ST 10 x 20 cm	25 Stk.	<input type="checkbox"/>	HAR01
	Zetuvit ST 20 x 20 cm	15 Stk.	<input type="checkbox"/>	HAR01
	Zetuvit ST 20 x 40 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	HAR01
	Vliwazell steril 10 x 10 cm	25 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02
	Vliwazell steril 10 x 20 cm	30 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02
	Vliwazell steril 15 x 20 cm	30 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02
	Vliwazell steril 15 x 25 cm	30 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02
	Vliwazell steril 20 x 20 cm	30 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02

2.3.2 Saugkomresse mit Superabsorber - steril

Empfohlen:	Respo Sorb Super Wundaufl. 10 x 10 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	HAR01
	Respo Sorb Super Wundaufl. 10 x 20 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	HAR01
	Respo Sorb Super Wundaufl. 15 x 20 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	HAR01
	Respo Sorb Super Wundaufl. 20 x 25 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	HAR01
	Respo Sorb Super Wundaufl. 20 x 40 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	HAR01
	Vliwasorb 7,5 x 7,5 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02
	Vliwasorb 10 x 10 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02
	Vliwasorb 10 x 20 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02
	Vliwasorb 20 x 20 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02
	Vliwasorb pro 12,5 x 12,5 cm*	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02
	Vliwasorb pro 12,5 x 22,5 cm*	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02
	Vliwasorb pro 22 x 22 cm*	10 Stk.	<input checked="" type="checkbox"/>	RAU02

* Vliwasorb pro ist ein neues Produkt mit einem höheren Anteil an Superabsorber und größerer Saugfähigkeit. Aus ökonomischen Gründen sollte es nur für große Exsudatmengen eingesetzt werden, wenn die zuvor gelisteten Produkte nicht ausreichend sind.

2.3.3 Saugkomresse - antimikrobiell, physikalisch

Indikation: Kontaminierte, infizierte Wunden mit starker Exsudation.

Wirkungsweise: Antimikrobieller Effekt durch physikalische (hydrophobe) Wechselwirkung, Aufnahme von hohen Exsudatmengen durch integrierten Superabsorber.

Empfohlen:	Cutimed Sorbion Sorbact 10 x 10 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	BSN01
	Cutimed Sorbion Sorbact 10 x 20 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	BSN01

2.3.4 Tamponade - antimikrobiell, physikalisch

Indikation: Kontaminierte, infizierte Wunden

Wirkungsweise: Antimikrobieller Effekt durch physikalische (hydrophobe) Wechselwirkung

Empfohlen:	Cutimed Sorbact Tamponade 2 x 50 cm	20 Stk.	<input type="checkbox"/>	BSN01
	Cutimed Sorbact Tamponade 5 x 200 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	BSN01

3. Wundschnellverbände, Fixierungen und Schlauchverbände

3.1 Wundschnellverband steril

Empfohlen: Mepore VB ST PHARM 9 x 10 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	MOE02
Mepore VB ST PHARM 9 x 15 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	MOE02
Mepore VB ST PHARM 9 x 20 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	MOE02
CURAPOR Wundvb. ST WE 7 x 5 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02
CURAPOR Wundvb. ST WE 10 x 8 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02

3.2 Folien, semipermeabel, steril

Indikation: Primäre Wundauflage bei nicht nässenden Wunden (Frische, kleine Operationswunden, oberflächliche, nicht nässende, epithelisierende Wunden), sekundäre Wundauflage zur Fixierung von Hydrofaser, Alginat oder Mullkompressen.

Wirkungsweise: Wundschutz, verhindert das Eindringen von Keimen und Feuchtigkeit, Austausch von Sauerstoff und Wasserdampf jedoch möglich. Wenn die Folie als primäre Wundauflage verwendet wird, kann sie mehrere Tage belassen und die Wunde durch die transparente Folie beobachtet werden.

Empfohlen: Hydrofilm 6 x 7 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	HAR01
Hydrofilm 10 x 12,5 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	HAR01
Hydrofilm 15 x 20 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	HAR01
Hydrofilm 12 x 25 cm	25 Stk.	<input type="checkbox"/>	HAR01
Tegaderm (3M) 15 x 20 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	DMO01
Tegaderm (3M) 10 x 12 cm	50 Stk.	<input type="checkbox"/>	DMO01
Tegaderm (3M) 10 x 25 cm	20 Stk.	<input type="checkbox"/>	DMO01
Suprasorb ST/F Fol. WVVB 5 x 7 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02
Suprasorb ST/F Fol. WVVB 10 x 12 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02

3.3 Folien, semipermeabel, nicht steril (in Rollen)

Indikation: Sekundäre Wundauflage zur Fixierung anderer Produkte (z. B. Saugkompressen)

Empfohlen: Xtrata Perme-Roll 10 m x 5 cm	1 Stk.	<input type="checkbox"/>	FOC02
Xtrata Perme-Roll 10 m x 10 cm	1 Stk.	<input type="checkbox"/>	FOC02
Xtrata Perme-Roll 10 m x 15 cm	1 Stk.	<input type="checkbox"/>	FOC02
Tegaderm Roll 10 m x 5 cm	1 Stk.	<input type="checkbox"/>	DMO01
Tegaderm Roll 10 m x 10 cm	1 Stk.	<input type="checkbox"/>	DMO01
Tegaderm Roll 10 m x 15 cm	1 Stk.	<input type="checkbox"/>	DMO01
Hydrofilm roll 10 m x 5 cm	1 Stk.	<input type="checkbox"/>	HAR01
Hydrofilm roll 10 m x 10 cm	1 Stk.	<input type="checkbox"/>	HAR01
Hydrofilm roll 10 m x 15 cm	1 Stk.	<input type="checkbox"/>	HAR01

3.4 elastische Fixierbinde nicht haftend

Empfohlen:	Mullbinden Nobatex elastisch 4 m x 6 cm	20 Stk.	<input type="checkbox"/>	KAE01
	Mullbinden Nobatex elastisch 4 m x 8 cm	20 Stk.	<input type="checkbox"/>	KAE01
	Mullbinden Nobatex elastisch 4 m x 10 cm	20 Stk.	<input type="checkbox"/>	KAE01
	Peha-Crepp Fixbd. 4 m x 6 cm	20 Stk.	<input type="checkbox"/>	HAR01
	Peha-Crepp Fixbd. 4 m x 8 cm	20 Stk.	<input type="checkbox"/>	HAR01
	Peha-Crepp Fixbd. 4 m x 10 cm	20 Stk.	<input type="checkbox"/>	HAR01
	Peha-Crepp Fixbd. 4 m x 12 cm	20 Stk.	<input type="checkbox"/>	HAR01
	Mollelast lose 4 m x 8 cm	20 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02
	Mollelast lose 4 m x 10 cm	20 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02
	Mollelast lose 4 m x 12 cm	20 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02

3.5 elastische Fixierbinde mit Hafteffekt

Empfohlen:	Peha haft latexfrei 4 m x 6 cm	1 Stk.	<input type="checkbox"/>	HAR01
	Peha haft latexfrei 4 m x 8 cm	1 Stk.	<input type="checkbox"/>	HAR01
	Peha haft latexfrei 20 m x 10 cm	1 Stk.	<input type="checkbox"/>	HAR01
	Peha haft latexfrei 20 m x 6 cm	1 Stk.	<input type="checkbox"/>	HAR01
	Peha haft latexfrei 20 m x 8 cm	1 Stk.	<input type="checkbox"/>	HAR01
	Mollelast Haft WE 20 m x 4 cm	1 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02
	Mollelast Haft WE 20 m x 6 cm	1 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02
	Mollelast Haft WE 20 m x 8 cm	1 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02
	Mollelast Haft WE 20 m x 10 cm	1 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02
	Mollelast Haft WE 20 m x 12 cm	1 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02

3.6 Schlauchverband ohne elastischen Faden vorgefertigt, einzeln verpackt

Empfohlen:	Schlauchvb. TG KONF. 2 Fingerl.	1 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02
	Schlauchvb. TG KONF. 7H/F lose	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02
	Schlauchvb. STUELPA 1 Finger	50 Stk.	<input type="checkbox"/>	HAR01
	*Adaptic digit Fingervb. small	10 Stk.	<input checked="" type="checkbox"/>	CHE06
	*Adaptic digit Fingervb. medium	10 Stk.	<input checked="" type="checkbox"/>	CHE06
	*Adaptic digit Fingervb. large	10 Stk.	<input checked="" type="checkbox"/>	CHE06
	*Adaptic digit Fingervb. X-large	10 Stk.	<input checked="" type="checkbox"/>	CHE06

*all-in-one Silikonfingerverband bei Fingerverletzung, modellierbar

3.7 Schlauchverband elastisch

Empfohlen:	Schlauchvb. TG 6,5 cm, 20 m	1 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02
	Schlauchvb. TG 7 cm, 20 m	1 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02
	Schlauchvb. STUELPA RO 3R 8 cm, 15 m	1 Stk.	<input type="checkbox"/>	HAR01
	Schlauchvb. STUELPA RO 4R 10 cm, 15 m	1 Stk.	<input type="checkbox"/>	HAR01
	Schlauchvb. Tubifast grün 10 m	1 Stk.	<input type="checkbox"/>	BST01
	Schlauchvb. Tubifast blau 10 m	1 Stk.	<input type="checkbox"/>	BST01
	Schlauchvb. Tubifast gelb 10 m	1 Stk.	<input type="checkbox"/>	BST01
	Schlauchvb. STUELPA RO 2R 6 cm, 15 m	1 Stk.	<input type="checkbox"/>	HAR01
	Schlauchvb. STUELPA RO 5R 12 cm, 15 m	1 Stk.	<input type="checkbox"/>	HAR01
	Schlauchvb. TG 5,5 cm, 20 m	1 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02
	Schlauchvb. TG 8,5 cm, 20 m	1 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02
	Schlauchvb. TG 12 cm, 20 m	1 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02

3.8 Netzschlauchverband

Empfohlen:	Schlauchvb. TG-FIX C Kopf kl., Arm, 4 m	1 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02
	Schlauchvb. TG-FIX D Kopf gr., 4 m	1 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02
	Schlauchvb. TG-FIX E Rumpf gr., 4 m	1 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02

3.9 Heftpflaster Gewebe

	LEUKOPLAST-S 47616 5 m x 5 cm	1 Stk.	<input type="checkbox"/>	BSN01
	LEUKOPLAST 47726 5 m x 10 cm	1 Stk.	<input type="checkbox"/>	BSN01

3.10 Heftpflaster Folie

Empfohlen:	Transpore (3M) 5 m x 25 mm 15271 EP	1 Stk.	<input type="checkbox"/>	DMO01
	Omnifilm Fixpfl. 5 m x 2,5 cm	1 Stk.	<input type="checkbox"/>	HAR01

3.11 Heftpflaster Kunstseide (Latexfrei)

Empfohlen:	Leukosilk 1021 5 m x 1,25 cm	1 Stk.	<input type="checkbox"/>	BSN01
	Leukosilk 1022 5 m x 2,50 cm	1 Stk.	<input type="checkbox"/>	BSN01

3.12 Klebevlies starr

Empfohlen:	Mefix Fixvb. 10 m x 5 cm	1 Stk.	<input type="checkbox"/>	MOE02
	Mefix Fixvb. 10 m x 10 cm	1 Stk.	<input type="checkbox"/>	MOE02
	Mefix Fixvb. 10 m x 15 cm	1 Stk.	<input type="checkbox"/>	MOE02

3.13 Klebevlies elastisch

Empfohlen:	Hypafix 10 m x 5 cm	1 Stk.	<input type="checkbox"/>	BSN01
	Hypafix 10 m x 10 cm	1 Stk.	<input type="checkbox"/>	BSN01
	Hypafix 10 m x 15 cm	1 Stk.	<input type="checkbox"/>	BSN01
	Hypafix 10 m x 20 cm	1 Stk.	<input type="checkbox"/>	BSN01
	Curafix-H Fixpfl. 10 m x 10 cm	1 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02
	Curafix-H Fixpfl. 10 m x 15 cm	1 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02
	Curafix-H Fixpfl. 10 m x 20 cm	1 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02

3.14 Schaumstoffbinden

Empfohlen:	Haftan BD 0,8 mm 27,5 m x 10 cm	6 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02
-------------------	---------------------------------	--------	--------------------------	-------

3.15 Synthetische Polsterbinden

Empfohlen:	Cellona Synth. Watte 3 m x 10 cm	4 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02
	Rolta soft Wattebd. UST 3 x 15 cm	20 Stk.	<input type="checkbox"/>	HAR01

3.16 Beschichtete Bandagen Alginatbeschichtung (textilelastisch)

Indikation: angiologische Kompressionstherapie, bei chronisch venöser Insuffizienz mit Gamaschenulcera.

Wirkungsweise: textilelastisch, unwesentlicher Ruhedruck.

Empfohlen:	Alegro Alginate Bielast 10 m x 10 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	SOR01
-------------------	--------------------------------------	--------	--------------------------	-------

3.17 Kompressionssysteme Einweg

Indikation: angiologische Kompressionstherapie, zur Konstanthaltung des Kompressionsdrucks (Kombination textil- und gummielastisch)

Empfohlen:	3M Coban 2	8 Stk.	■	DMO01
	3M Coban 2 lite	8 Stk.	■	DMO01
	Urgo K2 18 – 25 cm, 10 cm	6 Stk.	■	CHE06
	Urgo K2 Lite 18 – 25 cm, 10 cm	1 Stk.	■	CHE06
	Urgo K2 Latex free 18 – 25 cm, 10 cm	1 Stk.	■	CHE06
	Urgo K2 Latex free 25 – 32 cm, 10 cm	1 Stk.	■	CHE06

4. Hydrofaser- Auflagen und wirkverwandte Faserkompressen

Indikation: Mäßig bis stark nässende Wunden, bei wenig exsudierenden oder trockenen Wunden mit Ringerlösung befeuchten. Für saubere, postoperative, oder sekundär eröffnete Wunden, sekundär zuheilende drainierte Abszesse, offene Amputationswunden, bei Mazeration des Wundrandes.

Wirkungsweise: Hydrofaser-Verband besteht aus Natriumcarboxymethylcellulose. Hydrofasern können bis zum 25-fachen ihres Trockengewichtes an Exsudat aufsaugen. Dabei wird das Exsudat nur in vertikaler Richtung aufgenommen, quillt in die Höhe und nicht in die Breite, d.h. nur dort, wo auch Flüssigkeitskontakt besteht. Daher bleibt die Umgebung trocken und wird somit vor Mazeration geschützt, die Hydrofaser sollte daher den Wundrand immer 2 cm überlappen. Bei Kontakt mit dem Exsudat bildet sich eine weiche Gelschicht, ohne mit der Wunde zu verkleben. Zelltrümmer und Wundsekret werden zwischen den Fasern aufgenommen und eingeschlossen, sodass die Hydrofasern auch zur Wundreinigung beitragen. Hydrofasern fördern zudem die Granulationsbildung.

Benötigen immer einen Sekundärverband (z.B. Folienverband, evtl. dünnen Hydrokolloidverband)

4.1 Hydrofaser-Auflagen

Empfohlen:	Biosorb Gelling Fibre Dressing 5 x 5	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	CHE06
	Biosorb Gelling Fibre Dressing 10 x 10	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	CHE06
	Aquacel Extra Kompr. 5 x 5 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	CON06
	Aquacel Extra Kompr. 10 x 10 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	CON06
	Aquacel Extra Kompr. 15 x 15 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	CON06
	Aquacel Extra Kompr. 5 x 10 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	CON06

4.2 Hydrofaser-Auflagen mit Silber

Indikation: Mäßig bis stark nässende infizierte Wunden, Anwendungsdauer maximal 2 Wochen.

Achtung: Da silberhaltige Wundauflagen bei kritisch kolonisierten Wunden verwendet werden, sollte die Wunde spätestens alle 72 Std. neu beurteilt werden.

Empfohlen:	Aquacel AG Extra 5 x 5 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	CON06
	Aquacel AG Extra 10 x 10 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	CON06
	Aquacel Kompr. + Silb.-lon 4 x 10 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	CON06
	Aquacel AG Extra 15 x 15 cm	5 Stk.	<input checked="" type="checkbox"/>	CON06
	Aquacel AG Extra 20 x 30 cm	5 Stk.	<input checked="" type="checkbox"/>	CON06

5. Wundauflagen mit Aktivkohle

5.1 Aktivkohleauflage

Indikation: Geruchsabsorbierend bei übelriechenden Wunden, auch in der Palliativtherapie

Achtung: Wundauflagen dürfen nicht zugeschnitten werden, ansonsten gelangen Kohlepartikel in die Wunde. Der Verbandwechsel erfolgt nach Bedarf (Intervall meist 1-3 Tage), abhängig von der vorhandenen Exsudatmenge und Geruchsentwicklung.

Empfohlen:	Carboflex Wundvb. 10 x 10 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	CON06
	Carboflex Wundvb. 8 x 15 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	CON06
	Carbonet Wundauf. 10 x 10 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	SMI01
	Carbonet Wundauf. 10 x 20 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	SMI01

5.2 Aktivkohle Saugkomresse

Aktivkohle-Wundverband nicht verklebend, mit saugfähigem Kern und Wäscheschutz, geruchsabsorbierend

Empfohlen:	Vliwaktiv Saugkompr. 10 x 10 cm	20 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02
	Vliwaktiv Saugkompr. 10 x 20 cm	20 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02
	Curea P1 Duo Active 10 x 10 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	FOC02
	Curea P1 Duo Active 10 x 20 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	FOC02

5.3 Aktivkohleauflagen antimikrobiell Silber

Indikation: Für Palliativbereich! Geruchsabsorbierend, Silberabgabe gering, können lt. Hersteller auch länger als 2 Wochen verwendet werden.

Achtung: Da silberhaltige Wundauflagen bei kritisch kolonisierten Wunden verwendet werden, sollte die Wunde spätestens alle 72 Std. neu beurteilt werden.

Empfohlen:	Actisorb 220 CHEM 9,5 x 6,5 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	CHE06
	Actisorb 220 CHEM 10,5 x 10,5 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	CHE06
	Actisorb Plus 25 Aktivkohle-Wundauf. mit Silber 6,5 x 9,5 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	CHE06
	Actisorb Plus 25 Aktivkohle-Wundauf. mit Silber 10,5 x 10,5 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	CHE06
	Actisorb Plus 25 Aktivkohle-Wundauf. mit Silber 10,5 x 19 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	CHE06

6. Alginate (Wundfüller)

Indikation: Mäßige bis stark nässende und/oder blutende chronische Wunden (hämostyptische Wirkung des Alginats), tiefe Wunden und Wundhöhlen, geeignet für die Behandlung tiefer Wunden.

Wirkung: Zur Herstellung von Alginat-Wundauflagen benutzt man vorwiegend Calciumalginatfasern, die zu vliesartigen Kompressen oder Fasersträngen verarbeitet werden. Die watteartigen Calciumalginat-Fasern wandeln sich im Kontakt Blut und Wundsekret unter Quellung in ein feuchtes Gel um. Die freiwerdenden Calciumionen wirken blutstillend. Das Gel ist hydrophil und bindet bis zum 20-fachen des Trockengewichts an Flüssigkeit. Dabei werden Keime und Zelltrümmer in die Gelstruktur eingeschlossen. So wird ein ideal-feuchtes Wundmilieu geschaffen, überschüssiges Sekret wird gebunden. Bei geringer Exsudation können Alginate die Wunde austrocknen, bei starker Exsudation kann eine Wundrandmazeration begünstigt werden. Das Alginat sollte daher nur innerhalb der Wunde appliziert werden (Wundfüller). Bei wenig Exsudat besteht die Gefahr der Wundbettaustrocknung. Aufgrund der „Dochtwirkung“ sollten Alginate nicht auf Sehnen/Knochen liegen (sie legen trocken). Ein Sekundärverband ist immer erforderlich. Alginate halten kein Exsudat zurück, was ihren Einsatz unter Kompression einschränkt.

Achtung: Wenn Alginat über den Wundrand hinaus gelegt wird, können die Wundränder mazerieren (Wundrandschutz erforderlich!). Es muss daher genau auf die Wundgröße zugeschnitten und eingepasst werden. Je nach Exsudatmenge und Sekundärverband können Alginatverbände 1-4 Tage auf der Wunde bleiben! Gefahr der Austrocknung bei wenig Exsudat!

6.1 Alginat - Auflagen, neutral

Empfohlen:	NU-Derm Alginat Wundvb. steril, 5 x 5 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	CHE06
	NU-Derm Alginat Wundvb. steril, 10 x 10 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	CHE06
	NU-Derm Alginat Wundvb. steril, 10 x 20 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	CHE06
	Biatain Alginat Kompr. 10 x 10 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	COL03
	Biatain Alginat Kompr. 15 x 15 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	COL03

6.2 Alginat - Tamponade, neutral

Indikation: Mäßige bis stark nässende (blutende) tiefe chronische Wunden, Wundhöhlen bzw. Wundtaschen. Benötigen immer einen Sekundärverband (z. B. Folienverband, u.U. auch dünnen Hydrokolloidverband, etc.).

Empfohlen:	NU-Derm Alginat Wundtamponade steril, 30,5 x 2,5 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	CHE06
	Suprasorb ST/A Alginat Tamp.	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02

6.3 Alginat - Auflagen mit Silber, antimikrobiell

Indikation: Mäßige bis stark nässende (blutende) infizierte chronische Wunden. Benötigen immer einen Sekundärverband (Folienverband, u.U. auch dünnen Hydrokolloidverband oder Schaumstoff oder eine Saugkomresse je nach Sekretion), Anwendungsdauer maximal 2 Wochen.

Achtung: Da silberhaltige Wundauflagen bei infizierten oder kritisch kolonisierten Wunden verwendet werden, sollte die Wunde spätestens alle 72 Std. neu beurteilt werden.

Empfohlen:	Silvercel non-adherent Hydroalginat 5 x 5 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	CHE06
	Silvercel non-adherent Hydro-Alginat 10 x 20 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	CHE06
	Biatain Alginatkompr. m. Silber 10 x 10 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	COL03
	Suprasorb ST/A +AG Kompr. 5 x 5 cm	10 Stk.	<input checked="" type="checkbox"/>	RAU02
	Silvercel non-adherent Hydro-Alginat 11 x 11 cm	10 Stk.	<input checked="" type="checkbox"/>	CHE06

6.4 Alginat – Tamponade mit Silber, antimikrobiell

Indikation: Mäßige bis stark nässende (blutende) tiefe infizierte oder kritisch kolonisierten chronische Wunden, Wundhöhlen bzw. Wundtaschen. Anwendungsdauer maximal 2 Wochen.

Achtung: Da silberhaltige Wundauflagen bei infizierten oder kritisch kolonisierten Wunden verwendet werden, sollte die Wunde spätestens alle 72 Std. neu beurteilt werden.

Empfohlen:	Algisite Ag Tamponade 2 x 30 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	SMI01
	Silvercel non-adherent Hydroalginat 2,5 x 30,5 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	CHE06

7. Hydrokolloide

Indikation: gering exsudierende Wunden in allen Wundheilungsphasen, Epithelialisierungs- und Narbenphase, Schürfwunden (insbes. bei Kindern) und Blasen zur Aufrechterhaltung eines ideal feuchten Wundklimas. Wegen ihrer starken Haftung sind Hydrokolloide in der Wundversorgung einer dünnen Altershaut mit Vorsicht zu verwenden. Nicht bei infizierten Wunden!

Wirkungsweise: Hydrokolloid-haltige Wundauflagen bestehen aus einer selbstklebenden quellenden Masse, die nur geringe Mengen Wundexsudat aufnehmen kann. Die Hauptgefahren sind die Entwicklung einer feuchten Kammer und die Ausbildung eines sekundären Wundinfektes unter dem Hydrokolloid. Hydrokolloide werden in der Regel 4-7 Tage auf der Wunde belassen.

Achtung: Wegen der relativen Hypoxie unter dem Verband nicht bei klinisch infizierten Wunden, freiliegenden Knochen und Sehnen, ischämischen Ulcera anwenden.

7.1 Hydrokolloide dünn und extradünn

Empfohlen:	Suprasorb ST/H VB dünn 5 x 5 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02
	Suprasorb ST/H VB dünn 5 x 10 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02
	Suprasorb ST/H VB dünn 10 x 10 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02
	*Varihesive EX-DUE 10 x 10 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	CON06
	* für parastomale Wunden			
	Varihesive EX-DUE 5 x 10 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	CON06
	Varihesive EX-DUE 7,5 x 7,5 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	CON06

7.2 Hydrokolloide standard

Empfohlen:	Hydrocoll Wundvb. 7,5 x 7,5 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	HAR01
	Hydrocoll Wundvb. 5 x 5 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	HAR01
	Hydrocoll Wundvb. 10 x 10 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	HAR01
	Comfeel PL Flex Wundvb. 10 x 10 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	COL03
	Suprasorb ST/H VB standard 10 x 10 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02

7.3 Hydrokolloide mit Kleberand

Empfohlen:	Varihesive E Border 6 x 6 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	CON06
	Varihesive E Border 10 x 10 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	CON06
	Nu-Derm Border 5 x 5 cm,	20 Stk.	<input type="checkbox"/>	CHE06
	Nu-Derm Border 10 x 10 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	CHE06

7.4 Hydrokolloide transparent

Empfohlen:	Comfeel PL TP Wundvb. 5 x 7 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	COL03
	Comfeel PL TP Wundvb. 10 x 10 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	COL03

7.5 Hydrokolloide sacral

Empfohlen:	Comfeel PL CONT Wundvb. 6 x 8 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	COL03
-------------------	----------------------------------	--------	--------------------------	-------

8. Schaumstoffe

Indikation: Mäßig bis stark exsudierende Wunden (z. B. Spalthautentnahmestellen, Ablederungsverletzungen, stark exsudierende Schürfwunden).

Wirkungsweise: Schaumstoffe sind Polyurethanschwämme mit starker Saugkraft. Weichschaumkompressen saugen in alle Richtungen und behalten ihre Form und Größe. Schaumstoffe aus Hydropolymeren saugen nur vertikal und expandieren aufgrund der Flüssigkeitsaufnahme der Wundoberfläche entgegen. Hydropolymere haben den Vorteil, dass der Wundrand geschützt bleibt. Schaumstoffe gibt es klebend (Wundabdeckung) und nicht klebend (Wundfüller, sekundäre Fixierung nötig) und mit unterschiedlicher Saugkapazität (bis zum 20-30-fachen ihres Trockengewichtes). Der am häufigsten verwendete Klebstoff ist Acrylat (Vorsicht bei Kindern und Altershaut!). Für empfindliche Haut empfehlen sich silikonbeschichtete Schaumstoffe.

Je nach Exsudatmenge können Schaumstoffe bis zu sieben Tage auf der Wunde bleiben.

Bei ungenügendem Exsudat kann der Schaumstoff die Wunde nicht feucht halten; bei sehr konsistentem Exsudat können die Poren des Schaumstoffes verstopfen und so die Funktionalität beeinträchtigen. Zu unterscheiden sind Schaumstoffe mit geglätteter Oberfläche von offenporigen Schaumstoffe (ungeglättet, Verkleben möglich).

8.1 Schaumstoffe adhäsiv

8.1.1 Schaumstoffe adhäsiv, mit Haftrand, mäßig saugend

Achtung: Kleberand mit Acrylatkleber ist für Altershaut und Kinder nicht gut geeignet! Produktbeschreibung beachten!

Empfohlen: Suprasorb P adhesive 7,5 x 7,5 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02
Tegaderm Foam Adhesive (6 x 7,6 cm) 10 x 11 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	DMO01
Tegaderm Foam Adhesive (10 x 10 cm) 14,3 x 14,3 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	DMO01
Allewyn adhes. 7,5 x 7,5cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	SMI01

8.1.2 Schaumstoffe, adhäsiv, stark saugend

Empfohlen: Permafoam Schaumvb. COMF+K. 11 x 11 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	HAR01
Permafoam Schaumvb. COMF+K. 15 x 15 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	HAR01
Tielle Plus, 11 x 11 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	CHE06
Tielle Plus, 15 x 15 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	CHE06

8.1.3 Schaumverband adhäsiv, mit Haftrand, mit Silber

Indikation: Strenge Indikationstellung! (Paradoxon: Schaumstoffe haben eine lange Tragedauer, Silberverbände sollten bei Infekt häufig -u. U. sogar täglich- gewechselt werden). Mäßig exsudierende Wunden mit kritischer Kolonisation. Eine Anwendung als Prophylaxe und im Rahmen von infizierten Wunden ist aus ökonomischen Gründen nicht vorgesehen. Gibt Silber in die Wunde ab. Anwendungsdauer maximal 2 Wochen.

Wirkungsweise: PU-Weichschaum mit keimdichter Abdeckung, saugend mittels Kapillarkraft ohne Formveränderung (gibt Flüssigkeit unter Druck wieder ab) oder expandiert (Hydropolymere); zusätzlich kann ein Superabsorber eingelagert sein.

Achtung: Da silberhaltige Wundauflagen bei infizierten oder kritisch kolonisierten Wunden verwendet werden, sollte die Wunde spätestens alle 72 Std. neu beurteilt werden.

Empfohlen: Biatain Silicone AG Schaumverband 7,5 x 7,5 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	COL03
Biatain Silicone AG Schaumverband 10 x 10 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	COL03
Biatain Silicone AG Schaumverband 12,5 x 12,5 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	COL03
Biatain Silicone AG Schaumverband 15 x 15 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	COL03
Mepilex Border AG 7,5 x 7,5 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	MOE02
Mepilex Border AG 10 x 10 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	MOE02
Mepilex Border AG 15 x 15 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	MOE02
Mepilex Border AG 15 x 20 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	MOE02
Allevyn AG Gentle Border 7,5 x 7,5 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	SMI01
Allevyn AG Gentle Border 12,5 x 12,5 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	SMI01
Allevyn AG Gentle Border 17,5 x 17,5 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	SMI01

8.2 Schaumstoffe mit Beschichtung

8.2.1 Schaumstoffe mit Beschichtung - ohne Kleberand - gering saugend

Indikation: Schaumverband für nicht bis leicht exsudierende Wunden, geeignet für empfindliche vorgeschädigte Haut, atraumatisch durch Antihaf-Beschichtung

Empfohlen: Suprasorb P Silicone non-border 5 x 5 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02
Suprasorb P Silicone non-border 7,5 x 7,5 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02
Suprasorb P Silicone non-border 10 x 10 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02
Suprasorb P Silicone non-border 15 x 15 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02
Mepilex Lite 6 x 8,5 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	MOE02
Mepilex Lite 10 x 10 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	MOE02
Mepilex Lite 15 x 15 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	MOE02

8.2.2 Schaumstoffe mit Beschichtung - ohne Kleberand - mäßig bis stark saugend

Empfohlen: Mepilex XT 10 x 10 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	MOE02
Mepilex XT 20 x 20 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	MOE02
Mepilex Silikonvb. 10 x 10 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	MOE02
Mepilex Silikonvb. 10 x 20 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	MOE02
Mepilex Silikonvb. 20 x 20 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	MOE02
Askina DresSil 5 x 7 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	BRA05
Askina DresSil 10 x 10 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	BRA05
Askina DresSil 10 x 20 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	BRA05
Allevyn Gentle 5 x 5 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	SMI01
Allevyn Gentle 10 x 10 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	SMI01
Allevyn Gentle 10 x 20 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	SMI01
Allevyn Gentle 20 x 20 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	SMI01

8.2.3 Schaumverband adhäsiv (haftend durch Beschichtung), mit Silber

Indikation: Strenge Indikationsstellung! (Paradoxon: Schaumstoffe haben eine lange Tragedauer, Silberverbände sollten bei Infekt häufig -u. U. sogar täglich- gewechselt werden). Mäßig exsudierende Wunden mit kritischer Kolonisation. Eine Anwendung als Prophylaxe und im Rahmen von infizierten Wunden ist aus ökonomischen Gründen nicht vorgesehen. Gibt Silber in die Wunde ab. Anwendungsdauer maximal 2 Wochen.

Achtung: Da silberhaltige Wundauflagen bei infizierten oder kritisch kolonisierten Wunden verwendet werden, sollte die Wunde spätestens alle 72 Std. neu beurteilt werden.

Empfohlen: Allevyn AG Gentle 10 x 10 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	SMI01
Allevyn AG Gentle 10 x 20 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	SMI01
Allevyn AG Gentle 20 x 20 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	SMI01
Mepilex AG 10 x 10 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	MOE02
Mepilex AG 10 x 20 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	MOE02
Mepilex AG 20 x 20 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	MOE02

8.2.4 Schaumstoffe mit Beschichtung - mit Kleberand - gering saugend

Empfohlen: Biatain Silicone Lite 7,5 x 7,5 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	COL03
Biatain Silicone Lite 10 x 10 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	COL03
Biatain Silicone Lite 12,5 x 12,5 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	COL03
Foam Lite ConvaTec 10 x 10 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	CON06
Foam Lite ConvaTec 15 x 15 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	CON06
Mepilex Border Lite 4 x 5 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	MOE02
Mepilex Border Lite 7,5 x 7,5 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	MOE02
Mepilex Border Lite 5 x 12,5 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	MOE02
Mepilex Border Lite 10 x 10 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	MOE02
Mepilex Border Lite 15 x 15 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	MOE02
Allevyn Gentle Border Lite 7,5 x 7,5 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	SMI01
Allevyn Gentle Border Lite 5,5 x 12 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	SMI01
Allevyn Gentle Border Lite 10 x 10 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	SMI01
Allevyn Gentle Border Lite 15 x 15 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	SMI01

8.2.5 Schaumstoffe mit Beschichtung - mit Kleberand - mäßig bis stark saugend

Empfohlen: Mepilex Border Flex 7,5 x 7,5 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	MOE02
Mepilex Border Flex 10 x 10 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	MOE02
Mepilex Border Flex 13 x 16 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	MOE02
Mepilex Border Flex 15 x 19 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	MOE02
Mepilex Border 7,5 x 7,5 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	MOE02
Mepilex Border 10 x 10 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	MOE02

Biatain Silicone 7,5 x 7,5 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	COL03
Biatain Silicone 10 x 10 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	COL03
Biatain Silicone 10 x 20 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	COL03
Biatain Silicone 10 x 30 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	COL03
Biatain Silicone 12,5 x 12,5 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	COL03
Biatain Silicone 15 x 15 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	COL03
Biatain Silicone 17,5 x 17,5 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	COL03
Biatain Silicone Multishape 14 x 19,5 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	COL03
Aquacel Foam Wundaufl. adhesive 10 x 10 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	CON06
Aquacel Foam Wundaufl. adhesive 12,5 x 12,5 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	CON06
Aquacel Foam Wundaufl. adhesive 17,5 x 17,5 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	CON06
Aquacel Foam Wundaufl. adhesive 21 x 21 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	CON06
Urgo Tül Foam Border 8 x 8 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	CHE06
Urgo Tül Foam Border 10 x 10 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	CHE06
Urgo Tül Foam Border 15 x 15 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	CHE06
Allevyn Gentle Border 7,5 x 7,5 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	SMI01
Allevyn Gentle Border 12,5 x 12,5 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	SMI01
Allevyn Gentle Border 17,5 x 17,5 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	SMI01
Allevyn Gentle Border 10 x 20 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	SMI01
Allevyn Life 10,3 x 10,3 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	SMI01
Allevyn Life 12,9 x 12,9 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	SMI01
Allevyn Life 15,4 x 15,4 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	SMI01
Askina DresSil Border 7,5 x 7,5 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	BRA05
Askina DresSil Border 10 x 10 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	BRA05
Askina DresSil Border 20 x 20 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	BRA05

8.3 Schaumstoffe nicht-adhäsiv

8.3.1 Schaumstoffe gering saugend

Empfohlen: Urgo Tül Foam 6 x 6 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	CHE06
Urgo Tül Foam 10 x 12 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	CHE06
Urgo Tül Foam 15 x 20 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	CHE06

8.3.2 Schaumstoffe mäßig saugend

Empfohlen: Allevyn Non Adhes. 10 x 10 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	SMI01
Allevyn Non Adhes. 20 x 20 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	SMI01
Tielle VB 9,5 x 9,5 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	CHE06
Biatain Schaumvb. nicht haftend 5 x 7cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	COL03
Biatain Schaumvb. soft hold 5 x 7 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	COL03
Biatain Schaumvb. nicht haftend 10 x 10 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	COL03
Biatain Schaumvb. soft hold 10 x 20 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	COL03

Biatain Schaumvb. soft hold 15 x 15 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	COL03
Biatain Schaumvb. nicht haftend 15 x 15 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	COL03
Biatain Schaumvb. nicht haftend 20 x 20 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	COL03
Suprasorb P non-adhes. 7,5 x 7,5 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02
Suprasorb P non-adhes. 10 x 10 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02
Suprasorb P non-adhes. 15 x 15 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02
Suprasorb P non-adhes. 15 x 20 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	RAU02

8.3.3 Schaumstoffe stark saugend

Empfohlen: Tielle Non Adhesive Hydropolymer Verband, steril 10 x 10 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	CHE06
Tielle Non Adhesive Hydropolymer Verband, steril 15 x 15 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	CHE06
Tielle Non Adhesive Hydropolymer Verband, steril 17,5 x 17,5 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	CHE06
Aquacel Foam Wundaufl. non adhes. 10 x 10cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	CON06

8.3.4 Schaumstoffe, nicht adhäsiv- mit Silber

Indikation: Strenge Indikationsstellung! (Paradoxon: Schaumstoffe haben eine lange Tragedauer, Silberverbände sollten bei Infekt häufig -u. U.sogar täglich- gewechselt werden). Mäßig bis stark exsudierende Wunden mit kritischer Kolonisation. Eine Anwendung als Prophylaxe und im Rahmen von infizierten Wunden ist aus ökonomischen Gründen nicht vorgesehen. Gibt Silber in die Wunde ab, Anwendungsdauer maximal 2 Wochen.

Achtung: Da silberhaltige Wundauflagen bei infizierten oder kritisch kolonisierten Wunden verwendet werden, sollte die Wunde spätestens alle 72 Std. neu beurteilt werden.

Empfohlen: Biatain AG Schaumvb. nicht-haftend 10 x 10 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	COL03
Biatain AG Schaumvb. nicht-haftend 10 x 20 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	COL03
Biatain AG Schaumvb. nicht-haftend 20 x 20 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	COL03

8.4 Schaumstoffe reinigend & feuchtend

Achtung: Nicht kompatibel mit anderen Produkten! In Verbindung mit anderen Produkten (z.B. mit Gelen, Alginaten, Hydrofaser etc.) kommt die reinigende und feuchtende Wirkung nicht zum Tragen - es besteht somit kein Vorteil gegenüber kostengünstigeren Schaumstoffen.

8.4.1 Schaumstoffe reinigend & feuchtend – nicht adhäsiv – mäßig saugend

Indikation: Strenge Indikationsstellung! gering bis mäßig exsudierende Wunden.

Nicht kompatibel mit anderen Produkten!

Empfohlen: PolyMem non adhesive 8 x 8 cm	15 Stk.	<input type="checkbox"/>	FOC02
PolyMem non adhesive 10 x 10 cm	15 Stk.	<input type="checkbox"/>	FOC02
PolyMem non adhesive 13 x 13 cm	15 Stk.	<input type="checkbox"/>	FOC02

8.4.2 Schaumstoffe reinigend & feuchtend – nicht adhäsiv – stark saugend

Indikation: Strenge Indikationsstellung! Mäßig bis stark exsudierende Wunden. Nicht kompatibel mit anderen Produkten!

Empfohlen: PolyMem Max 11 x 11 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	FOC02
PolyMem Max 20 x 20 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	FOC02

8.4.3 Schaumstoffe reinigend & feuchtend – nicht adhäsiv, mit Silber

Indikation: Strenge Indikationsstellung! (Paradoxon: Schaumstoffe haben eine lange Tragedauer, Silberverbände sollten bei Infekt häufig -u. U. sogar täglich- gewechselt werden). Gering bis mäßig exsudierende infizierte Wunden. Anwendungsdauer maximal 2 Wochen.

Wirkungsweise: Aufrechterhalten eines ideal feuchten Wundklimas; reinigend; keimzahlreduzierende Wirkung – Silber wird nicht an die Wunde abgegeben.

Achtung: nicht kompatibel mit anderen Produkten! Bei Kombination (mit z.B. Gelen, Alginaten, Hydrofaser etc.) kommt die reinigende und feuchtende Wirkung nicht zum Tragen und hat somit keinen Vorteil gegenüber von kostengünstigeren Schaumstoffen. Da silberhaltige Wundauflagen bei infizierten oder kritisch kolonisierten Wunden verwendet werden, sollte die Wunde spätestens alle 72 Std. neu beurteilt werden.

Empfohlen: PolyMem Max non-adhesive Silber 10 x 10 cm	8 Stk.	<input type="checkbox"/>	FOC02
PolyMem Max non-adhesive Silber 20 x 20 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	FOC02

8.4.4 Schaumstoffe reinigend & feuchtend – cavity – stark saugend

Achtung: Nicht kompatibel mit anderen Produkten!

Empfohlen: PolyMem Wic Cavity 8 x 8 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	FOC02
---	---------	--------------------------	-------

8.4.5 Schaumstoffe reinigend & feuchtend – cavity – stark saugend, mit Silber

Achtung: Nicht kompatibel mit anderen Produkten!

Empfohlen: PolyMem Wic Cavity Silber 8 x 8 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	FOC02
--	---------	--------------------------	-------

8.4.6 Schaumstoffe - offenporig

Indikation: Die offenporigen Schaumverbände üben einen starken Granulationsreiz aus. Werden vorwiegend zur kurzfristigen Wundkonditionierung vor plastischen Eingriffen eingesetzt.

Achtung: Die Auflage darf nicht auf Knorpel, Knochen, Periost, Perichondrium oder Sehnen angewendet werden.

Empfohlen: Ligasano Kompr. steril 15 x 10 x 1 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	LIG01
Ligasano Kompr. steril 24 x 16 x 1 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	LIG01
Ligasano Kompr. steril 5 x 5 x 1 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	LIG01
Ligasano Kompr. steril 10 x 10 x 1cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	LIG01

8.5 Schaumstoffe für spezielle Lokalisationen

8.5.1 Schaumstoffe Sacral - mäßig saugend

Empfohlen: Allewyn Sacrum 17 x 17 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	SMI01
Allewyn Sacrum 22 x 22 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	SMI01
Biatain Schaumvb. Sacrum 23 x 23 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	COL03

8.5.2 Schaumstoffe Sacral – mit Beschichtung – mit Kleberand – mäßig bis stark saugend

Empfohlen: Urgo Tül Foam Border Sacrum 20 x 20 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	CHE06
--	--------	--------------------------	-------

8.5.3 Schaumverband Sacral – haftend durch Beschichtung – mäßig saugend

Indikation: Schaumverband für mäßig exsudierende Wunden zur Versorgung am Sacrum

Empfohlen: Biatain Silicone Sacrum 15 x19 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	COL03
Mepilex Border Sacrum 15 x15 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	MOE02
Aquacel Foam adhäsiv Wundaufkl. sacral 24 x 21,5 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	CON06
Mepilex Border Sacrum 23 x 23 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	MOE02

8.5.4 Schaumstoffe Sacral mit Silber – antimikrobiell

Indikation: Strenge Indikationsstellung (Paradoxon: Schaumstoffe haben eine lange Tragedauer, Silberverbände sollten bei Infekt häufig -u. U. sogar täglich- gewechselt werden). Schaumverband für mäßig bis stark exsudierende, kritisch kolonisierte Wunden. Anwendungsdauer maximal 2 Wochen.

Wirkungsweise: Antimikrobiell, gibt Silber in die Wunden ab.

Achtung: Da silberhaltige Wundaufgaben bei infizierten oder kritisch kolonisierten Wunden verwendet werden, sollte die Wunde spätestens alle 72 Std. neu beurteilt werden.

Empfohlen: Mepilex Border Sacrum AG 18 x 18 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	MOE02
Mepilex Border Sacrum AG 23 x 23 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	MOE02
Allewyn AG Sacrum 17 x 17 cm	10 Stk.	<input checked="" type="checkbox"/>	SMI01
Allewyn AG Sacrum 22 x 22 cm	10 Stk.	<input checked="" type="checkbox"/>	SMI01

8.5.5 Schaumstoffe – Ferse – mäßig saugend

Schaumstoff-Fersenverbände sind ausschließlich als Wundverband bei Ulzerationen im Fersenbereich vorgesehen. Ein Einsatz als Lagerungsbehelf oder Polstermaterial ist ökonomisch nicht zu verantworten!

Empfohlen: Tielle plus Heel 20 x 26,5 cm *)	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	CHE06
Mepilex Heel 13 x 20 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	MOE02
Mepilex Heel 15 x 22 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	MOE02
ALLEVYN Gentle Border Heel 23 x 23,2 cm	5 Stk.	<input type="checkbox"/>	SMI01

*) Auf Grund der besonderen Form kann der Verband auch für Ellbogen oder Schulter verwendet werden.

8.5.6 Schaumstoffe -Cavity- mäßig saugend

Indikation: zum Auffüllen tiefer Wunden.

Empfohlen: Permafoam Schaumvb. CAVITY 10 x 10 cm 3 Stk. HAR01

8.5.7 Schaumstoffe – haftend durch Beschichtung, Cavity- mäßig saugend

Indikation: nur für spezielle Indikationen geeignet, z.B. palliative Versorgung, exulcerierende Tumore, Epidermiolysis bullosa (s. auch Anhang I Spezialprodukte für diese Indikation).

Empfohlen: Mepilex Transfer 15 x 20 cm 5 Stk. MOE02

8.5.8 Schaumstoffe -Tracheo-

Empfohlen: Permafoam Schaumvb. TRACHEO 8 x 8 cm 10 Stk. HAR01
Allewyn Tracheostomy ST 9 x 9 cm 10 Stk. SMI01

9. Superabsorber (Polyacrylatabsorber)

Indikation: stark exsudierende, chronische Wunden; „nasse Wunden“.

Wirkungsweise: Durch Vernetzung von Acrylsäure und Natriumacrylat entsteht ein gelbildendes Polymer, das extreme Mengen Wasser binden kann und auch unter Druck nicht freigibt. Diese Polyacrylat-Superabsorber werden in reiner Form und als Beimischungen in Verbandmaterialien verwendet. Durch vertikale Absorption bleibt der Wundrand trocken. Superabsorber können als Primär- oder Sekundärverband verwendet werden. Generell eignen sich Superabsorber vor allem für sehr stark exsudierende Wunden, bei denen der Verbandwechsel aufgrund der Exsudatmenge mehrmals täglich durchgeführt werden müsste. Mit diesem Verband kann die Verweildauer des Materials auf der Wunde verlängert und das Auslaufen des Exsudates vermieden werden.

Achtung: Nicht zerschneiden! Verbandwechsel nach Durchtritt von Flüssigkeit, spätestens nach 4 Tagen.

9.1 Saugstarke Wundauflage, Superabsorber mit Zellulose verpresst, Absorption mehr als 150g genormte Prüflösung/100cm² Saugkern

Empfohlen: Mextra Superabsorbent 10 x10 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	MOE02
Mextra Superabsorbent 10 x 15 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	MOE02
Mextra Superabsorbent 10 x 20 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	MOE02
Mextra Superabsorbent 15 x 20 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	MOE02
Mextra Superabsorbent 20 x 25 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	MOE02
Mextra Superabsorbent 20 x 30 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	MOE02
Cutimed Sorbion Sachet S 7,5 x 7,5 cm	25 Stk.	<input type="checkbox"/>	SOR01
Cutimed Sorbion Sachet S 10 x 10 cm	25 Stk.	<input type="checkbox"/>	SOR01
Cutimed Sorbion Sachet S 15 x 15 cm	25 Stk.	<input type="checkbox"/>	SOR01
Cutimed Sorbion Sachet S 20 x 10 cm	25 Stk.	<input type="checkbox"/>	SOR01
Cutimed Sorbion Sachet S 20 x 20 cm	25 Stk.	<input type="checkbox"/>	SOR01
Cutimed Sorbion Sachet 20 x 30 cm	25 Stk.	<input type="checkbox"/>	SOR01
*Cutimed Sorbion Sachet XL 45 x 25 cm	10 Stk.	<input checked="" type="checkbox"/>	SOR01

*Bei Gamaschenulcus

9.2 Saugstarke Wundauflage, Superabsorber mit geringem Zelluloseanteil, Absorption mehr als 150g genormte Prüflösung/100cm² Saugkern

Empfohlen: DryMax Extra Soft 10 x 10 cm	25 Stk.	<input type="checkbox"/>	WER04
DryMax Extra Soft 10 x 20 cm	25 Stk.	<input type="checkbox"/>	WER04
DryMax Extra Soft 20 x 20 cm	25 Stk.	<input type="checkbox"/>	WER04

9.3 Saugstarke Wundauflage, Superabsorber mit Zellulose verpresst, mit nicht verklebender Wundkontaktschicht, Absorption mehr als 150g genormte Prüflösung/100cm² Saugkern

Empfohlen: Cutimed Sorbion Comfort 12 x 12 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	SOR01
Cutimed Sorbion Comfort 22 x 12 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	SOR01
Cutimed Sorbion Comfort 8,5 x 8,5 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	SOR01
Cutimed Sorbion Comfort 22 x 22 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	SOR01
Curea P2 10 x 10 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	FOC02
Curea P2 10 x 20 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	FOC02
Curea P2 20 x 20 cm	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	FOC02

10. Hydrogele

10.1 Hydrogel – Verbände

Indikation: Trockene und gering exsudierende Wunden auch mit Schorf oder Belägen, insbesondere Verbrennungen. Benötigen immer einen Sekundärverband.

Wirkungsweise: Hydrogelverbände wirken kühlend, geben Feuchtigkeit ab und schaffen ein ideal feuchtes Mikroklima bei trockenen oder gering feuchten Wunden. Unterstützen das autolytische Debridement indem Schorfe und Beläge aufgeweicht werden.

Empfohlen: Hydrosorb Wundverband 10 x10 cm 5 Stk. HAR01

10.2 Amorphe Hydrogele – neutral

Indikation: Trockene und gering exsudierende Wunden (z.B. Leicht belegte, sekundär heilende Wunden, zum Befeuchten von trockenen oder schmerzenden Wunden). Schutz vor Austrocknung bei freiliegenden Sehnen, Muskeln und Knochen. Mit Hydrogelen lassen sich Nekrosen und Beläge aufweichen. Benötigen immer einen Sekundärverband (z.B. Folienverband, u.U. dünnen Hydrokolloidverband)! Darüber hinaus werden sie zum Feuchthalten von schwach bis mäßig sezernierenden Wunden eingesetzt. Aktivierung von Acticoat-Wundauflagen (s. unter 2.2).

Wirkungsweise: Hydrogele geben Feuchtigkeit ab und schaffen ein ideal feuchtes Mikroklima bei trockenen oder gering feuchten Wunden. Unterstützen auch das autolytische Debridement indem Schorfe und Beläge aufgeweicht werden. Zum Befeuchten von wenig exsudierenden Wunden.

Achtung: Der kühlende Effekt kann bei Patienten mit arteriellen Durchblutungsstörungen starke Schmerzen verursachen.

Kontaktallergien auf einzelne Inhaltsstoffe möglich (z.B. Propylenglykol)

Vorsicht - Mazeration der Wundränder möglich!

Empfohlen: NU-Gel Hydrogel + Algin 15 g	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	CHE06
Tegaderm (3M) Hydrogel 15 g	10 Stk.	<input type="checkbox"/>	DMO01
NU-Gel Hydrogel + Algin 25 g	6 Stk.	<input type="checkbox"/>	CHE06

10.3 Amorphe Hydrogele – antimikrobiell

Indikation: Kontaminierte, trockene und gering sezernierende Wunden auch mit Schorf und Belägen. Sekundärverband immer erforderlich (Folienverband, u.U. dünner Hydrokolloidverband).

Empfohlen: Actimaris Wundgel 20 g	1 Stk.	<input type="checkbox"/>	CHE06
*Prontosan Wundreinigungsgel 30 g	1 Stk.	<input type="checkbox"/>	BRA05
*Octenilin Wundgel 20 ml	1 Stk.	<input type="checkbox"/>	SCH27

Achtung: Polihexanid- und Octenidin-haltige Wundprodukte* sind toxisch für Knorpelgewebe!

11. Sonstige Wundprodukte

11.1 absorbierendes Alginogel

Indikation: Mässig bis stark nässende Wunden

Wirkungsweise: Einzigartiges Produkt aus einem in hydratisierte Alginat eingebetteten antibakteriellen Enzymsystem. Reduziert Bakterien, hält die Wunde feucht und sauber, schützt den Wundrand.

Produkte: Flaminol forte 40g 1 Stk. PUB01
Flaminol Hydro Gel 40g 1 Stk. PUB01

11.2 flüssige Hyaluronsäure

keine Kombination mit anderen Verbandstoffen außer mit sterilen Mullkompressen aus Baumwolle.

Indikation: Strenge Indikationsstellung! Bei trocken bis mäßig exsudierenden, stagnierenden Wunden, kritisch kolonisiert bis infiziert.

Wirkungsweise: Gibt Feuchtigkeit ab und schafft ein ideal feuchtes Mikroklima bei trockenen oder gering feuchten Wunden. Unterstützt das autolytische Debridement, indem Schorfe und Beläge aufgeweicht werden. Zur Reinigung und Dekontamination.

Produkte: *Hyiodine 50g 1 Stk. SOR01
*enthält Iod-Komplex, Allergierisiko gering

Hersteller:

ALL08	Allomed	HAR01	Hartmann
BRA05	B. Braun	KAE01	KAEB GmbH
BSN01	BSN medical Medizinprodukte GmbH	LIG01	Ligasano
BST01	Bständig	MOE02	Mölnycke
CHE06	Chemomedica	PUB01	PubliCare
COL03	Coloplast	RAU02	Lohmann & Rauscher
CON06	Convatec	SCH27	Schülke Mayr
DMO01	3M	SMI01	Smith & Nephew
FOC02	Ferris Polymem (Focusmed)	SOR01	Sorbion Austria
FRE02	Fresenius Kabi Austria	WER04	Werfen Austria

Anhang 1: Spezialprodukte Epidermolysis bullosa

Die im Anhang 1 aufgeführten Produkte können nur für die Diagnose Epidermolysis bullosa erstattet werden.

Wunddistanzgitter

+ UrgoTül 10 x10 cm	10 Stk.	■	CHE06
+ UrgoTüll Soft 10 x10 cm	10 Stk.	■	CHE06

Wundauflagen mit Silikon

+ ReSkin Spycra Protect 10 x 7,5 cm	10 Stk.	■	ALL08
+ ReSkin Spycra Protect 18 x 10 cm	5 Stk.	■	ALL08
+ Adaptic Wundverband 7,6 x 20,3 cm	24 Stk.	■	CHE06

Bakteriostatische Wundabdeckung (Bismut Tribromophenat)

- Xeroform 10 x 10 cm	12 Stk.	■	
-----------------------	---------	---	--

Schlauchverband elastisch

+ Tubifast rot	1 Stk.	■	BST01
----------------	--------	---	-------

Schaumstoff mit Beschichtung ohne Kleberand

- MEPILEX lite 20 x 50	5 Stk.	■	MOE02
------------------------	--------	---	-------

Schaumstoffe – haftend durch beschichtung, Cavity – mäßig saugend

+ MEPILEX Transfer 15 x 20	5 Stk.	■	MOE02
+ MEPILEX Transfer 20 x 50	2 Stk.	■	MOE02

Schaumverband adhäsiv (haftend durch Beschichtung), mit Silber

- MEPILEX AG 20 x 50	5 Stk.	■	MOE02
- Medigel 10g	1 Stk.	■	

- = nicht im Ostvertrag

+ = im Ostvertrag, können mit Nr des Ostvertrages zur Abrechnung gebracht werden.

